



Kenmerken

- ✓ Hydrogel pleister met urea, tot 8 uur effectief (bijvoorbeeld wanneer je slaapt)
- ✓ Vermindert verkleuring & verdikking nagel
- ✓ Hydrateert door schimmel beschadigde nagels intensief en herstelt het natuurlijke uiterlijk

Indicatie

Mycosan Kalknagel Pleister biedt een continu hydraterend effect, bevordert het verbeterde uiterlijk van verkleurde en vervormde nagels, maakt de nagelplaat zachter en voorkomt groei van schimmelinfecties door de micro-omgeving van de nagel te veranderen.

Gebruiksaanwijzing:

1. Maak het gebied waar je de pleister aanbrengt schoon en droog.
2. Knip het sachet open en neem er een pleister uit.
3. Verwijder de beschermfolie en breng de pleister aan op het aangetaste gebied. Dek de nagel en teen- of vingertop goed af, zoals in de afbeeldingen hieronder.
4. Maak de nagel schoon na het verwijderen van de pleister.

Gebruik pleister: breng eenmaal daags een pleister aan op de aangetaste nagel, bij voorkeur voor het slapengaan. Behandel gedurende een periode van 3-6 maanden. De duur van de behandeling hangt af van de conditie van de nagel.

Volg de instructies hieronder:








Instructies:
Reinig de nagels en omliggende huid grondig, verwijder eventuele nagellak en droog de tenen of vingers goed af gezien vuil en vocht de hechting van de pleister verminderen.

1. Verwijder de beschermfolie ① en ② in numerieke volgorde.
2. Breng de pleister aan op het aangetaste gebied op de nagel en verwijder de witte strip ③.
3. Vouw beide zijdes van de pleister stevig om de teen of vinger heen ④.
4. Vouw vervolgens de bovenkant ⑤ van de pleister om de teen-/vingertop heen om ook deze te bedekken.
5. Laat de pleister 6-8u zitten ⑥ (bij voorkeur in de nacht) en herhaal de behandeling gedurende 3-6 maanden.

Datum van uitgifte van de laatste revisie van de gebruiksaanwijzing: 18/12/2019

Ingrediënten:
Urea, 1,3-Butylene Glycol, Fumaric Acid

Bewaarcondities:
Bewaar op een koele, droge plaats en in een luchtdichte verpakking op kamertemperatuur. Buiten het bereik van kinderen en peuters houden. Sluit het sachet na elk gebruik goed af om te voorkomen dat de andere pleisters uitdrogen.

Voorzorgsmaatregelen:

- Alleen voor uitwendig gebruik - alleen voor volwassenen.
- Vermijd contact met ogen, mond, slijmvlieszen, wonden en zonverbrande of ontstoken huid.
- Niet gebruiken als u eerder een negatieve reactie heeft gehad op welk type pleister dan ook.
- Niet gebruiken als u allergisch bent voor een van de ingrediënten.
- Als een van de bijwerkingen ernstig wordt of als je een bijwerking opmerkt die niet op deze verpakking vermeld staat, raadpleeg dan een arts.
- Stop met het gebruik als uw huid rood, gezwollen of geïrriteerd wordt.

Distributeur
Serrix Nederland B.V.
Herengracht 458
1017 CA Amsterdam
Nederland

Fabrikant
Wooshin Labottach Co., Ltd. (Songdo BRC SMART
Valley B-109, 914, 915, 1013, 1014, 1015, 1018, 1019)
30, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, Incheon City,
Republic of Korea.

EC REP
Wooshin Lapache d.o.o.
Industrijska Cesta 1J
1290 Grosuplje
Slovenie

LOT



*Op basis van Circana data MAT40 2024 M485NL 100



MYCOSAN

KALKNAGEL PLEISTER

INTENSIEVE BEHANDELING



TOT 8u EFFECTIEF

DAG-OF NACHTBEHANDELING

No.1 KALKNAGEL*

- ✓ Vermindert verkleuring & verdikking van de nagel
- ✓ 14 x Hydrogel Patch: hydrateert door schimmel beschadigde nagels

*FRONT

*BACK